

Pflegeanleitung für Zahnersatz aus

TRENDPERFEKT

HOCHLEISTUNGS-KUNSTSTOFF

Sehr geehrter Patient!

Sie haben sich bei Ihrem Zahnersatz für hochwertiges Material aus unserem Hause entschieden.

Die Pflege Ihres Zahnersatzes hat Einfluss auf seine Qualität und Langlebigkeit. Deshalb führen Sie die Pflege und Reinigung wie folgt durch:

- herausnehmbarer Zahnersatz

2x täglich mit Handbürste (weiche Borsten) und Kernseife oder Spülmittel unter heißem Wasser reinigen.

Verwenden Sie **KEINE** handelsüblichen Prothesenreiniger wie Kukident, Corega Tabs o.ä..

Zur Geschmacksverbesserung können Sie die Prothese anschließend kurz in Mundwasser legen.

- festsitzender Zahnersatz

2x täglich mit einer weichen Zahnbürste und sensitiv Zahncreme reinigen.

Hochprozentige Alkohollösungen (50 - 90%) können bei Langzeitkontakt zu Sprüngen in der Oberfläche (Krakelees) führen. Normale handelsübliche Spirituosen haben keinen Einfluss auf das Material.

Stand 04.Juli 2016